

Kompresivní pahýlové návleky



Quality for life



Kompresivní pahýlové návleky

Naše kompresivní pahýlové návleky jsou důležitým doplňkem pro pooperační péči o pahýl. Zajišťují potřebný tlak na pahýl, který se od distálního konce k proximálnímu zmenšuje, a zároveň vysokou úroveň komfortu pro uživatele.

Přehled výhod

- Dobrá fixace měkké tkáně a rychlé vstřebání otoku
- Tvarování pahýlu a urychlení vybavení pacienta protézou
- Rovnoměrná komprese
- Dlouhodobý stálý účinek s vysokým komfortem díky kvalitním materiálům s elastanovým vláknem
- Rychlá a jednoduchá aplikace
- Nízkonákladová a efektivní raná péče o pahýl

Nové

Fixační pás se silikonovými nopky (bércevní návlek)

- Návlek nesklouzává z pahýlu
- Dobré ulpění a prodyšnost

Oblast použití


Kompresivní pahýlový návlek slouží jako náhrada za pooperační bandážování. Používá se po amputaci, aby se zabránilo posttraumatickému otoku, zlepšil se krevní oběh v pahýlu a zabránilo se tvorbě edému po sejmutí protézy. Dodáváme kompresivní pahýlové návleky pro stehenní a bércevní pahýly ve dvou kompresních třídách a v různých velikostech, aby bylo možné pokrýt individuální požadavky pacientů.

Kontraindikace

Např. tepenný uzávěr, kongestivní srdeční insuficience – o použití rozhoduje lékař

Informace pro objednání

Stehenní návlek (s bederním pásem)

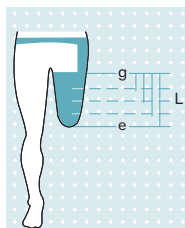

1 Výběr kompresní třídy

| | |
|-------------------|--------|
| kompresní třída 1 | 451F12 |
| (menší komprese) | |
| kompresní třída 2 | 451F11 |
| (větší komprese) | |

2 Výběr velikosti

| Velikost | Obvod g | Obvod e |
|----------|------------|------------|
| XS | 41 – 44 cm | 29 – 31 cm |
| S | 44 – 48 cm | 31 – 34 cm |
| M | 48 – 52 cm | 34 – 37 cm |
| L | 52 – 56 cm | 37 – 40 cm |
| XL | 56 – 60 cm | 40 – 43 cm |
| XXL | 60 – 64 cm | 43 – 46 cm |

451F12
(kompresní třída 1)
451F11
(kompresní třída 2)


3 Výběr délky

Délka (L)=g-e: 20, 25, 30, 35 cm

4 Příklad objednání

451F12=XS-20

Bércevní návlek (fixační pás se silikonovými nopky)

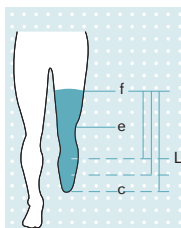

1 Výběr kompresní třídy

| | |
|-------------------|--------|
| kompresní třída 1 | 451F13 |
| (menší komprese) | |
| kompresní třída 2 | 451F10 |
| (větší komprese) | |

2 Výběr velikosti

| Velikost | Obvod f | Obvod e | Obvod c |
|----------|------------|------------|------------|
| XS | 39 – 41 cm | 29 – 31 cm | 27 – 29 cm |
| S | 41 – 44 cm | 31 – 34 cm | 29 – 32 cm |
| M | 44 – 47 cm | 34 – 37 cm | 32 – 35 cm |
| L | 47 – 50 cm | 37 – 40 cm | 35 – 38 cm |
| XL | 50 – 53 cm | 40 – 43 cm | 38 – 41 cm |
| XXL | 53 – 56 cm | 43 – 46 cm | 41 – 44 cm |

451F13
(kompresní třída 1)
451F10
(kompresní třída 2)

3 Výběr délky

Délka (L)=f-c: 30, 38, 46 cm

4 Příklad objednání

451F13=XS-30-N

| | Kód ZP | Cena s DPH | Doplatek |
|--------|------------|------------|----------|
| 451F12 | 04/0011695 | 912,- Kč | 228,- Kč |
| 451F11 | 04/0011694 | 912,- Kč | 228,- Kč |

| | Kód ZP | Cena s DPH | Doplatek |
|--------|------------|------------|----------|
| 451F13 | 04/0011697 | 590,- Kč | 148,- Kč |
| 451F10 | 04/0011696 | 590,- Kč | 148,- Kč |

Částečnou úhradu zdravotní pojišťovnou lze čerpat na 2 kusy návleků během jednoho roku.